

Otrivin Natural Aloe Vera tengervizes orrspray

Természetes, izotóniás tengervíz oldat tisztító és nyugtató tulajdonságokkal

Gyengéd orrspray Aloe Verával



Kérjük az Otrivin Natural Aloe Vera tengervizes orrspray (továbbiakban Otrivin Natural Aloe Vera orrspray) használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Amennyiben kérdése van, forduljon kezelőorvosához, gyógyszerészéhez.

Az orr fontos szerepet játszik a belélegzett levegő felmelegítésében és párásításában, valamint a levegőben található kisebb részecskék szűrésében, ezáltal biztosít védelmet az alsó légutak számára a portól, irritációtól és kiszáradástól. Ezért fontos, hogy az orrüregeket tisztán és nedvesen tartsuk, hogy az orr megfelelően elláthassa az összes funkcióját.

1. Mi az Otrivin Natural Aloe Vera orrspray és mire használható?

Az Otrivin Natural Aloe Vera orrspray egy tartósítószer mentes, 100%-ban természetes izotóniás tengervízoldat. Ez a termék az aloe vera növény természetes porát is tartalmazza, mely nyugtató és hidratáló tulajdonságokkal rendelkezik.

Az Otrivin Natural Aloe Vera orrspray használata javasolt:

- Gyengéden tisztítja a megfázás vagy allergia következtében eldugult orrüregeket a felesleges váladék vagy az allergének, például por vagy pollen lemosásával.
- Nyugtatja az irritált orrjáratokat.
- Hidratálja az orrnyálkahártyát, ha az száraz vagy irritált enyhébb orrrirritáció vagy alacsony páratartalom miatt (pl. fűtött / légkondicionált helyiségek, nagy magasság, légi közlekedés miatt).
- Hígítja és lazítja az orrváladékot és segíti az eltávolítását.

Az Otrivin Natural Aloe Vera orrspray alkalmas az orr napi tisztítására.

2. Miért válassza az Otrivin Natural Aloe Vera orrsprayt?

Az Otrivin Natural Aloe Vera orrsprayt kifejezetten kisgyermek számára fejlesztették ki. A szórófej alakja a gyermekek orrához igazodik valamint felnőttek számára is alkalmas. Az oldat finom, enyhe permete orrfolyás vagy orrdugulás esetén gyengéden mossa át az orrot. Az orrspray az orrjáratok nedvesítésére is használható.

3. Mielőtt használni kezdi az Otrivin Natural Aloe Vera orrsprayt



Figyelem: A készítmény használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót! Ne használja a terméket, ha valamelyik összetevőjére (lásd az összetevők listáját) allergiás.



Ne használjon törött vagy sérült terméket! Ne tegye mikrohullámú sütőbe!

Konzultáljon kezelőorvosával, amennyiben orrműtét vagy orrsérülés után szeretné alkalmazni az Otrivin Natural Aloe Vera orrsprayt.

Tisztító tulajdonságai miatt ezt a készítményt alkalmazza először amennyiben egyidejűleg más, helyileg alkalmazandó orrkészítményt is használ (pl: megfázás, vagy allergiás rhinitis elleni terméket). Az Otrivin Natural Aloe Vera orrspray terhesség vagy szoptatás ideje alatt is alkalmazható, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a készítmény alkalmazása előtt!

4. Hogy kell alkalmazni az Otrivin Natural Aloe Vera orrsprayt?

Szokásos adagolási gyakoriság: **orrnílásonként naponta 1-2 alkalommal**. Szükség esetén a készítmény gyakrabban is használható.

Az Otrivin Natural Aloe Vera orrspray alkalmazása felnőtteknek és 2 évnél idősebb gyermekeknek ajánlott.

11 évnél fiatalabb gyermekek esetén felnőtt felügyelete mellett alkalmazandó.

Idős vagy fogyatékkal élő embereknél a készítmény használatához szükség lehet egy felnőtt segítségére.

Az előírásoknak megfelelő használat mellett az Otrivin Natural Aloe Vera orrspray jól tolerálható.

Higiéniai okokból és a szennyeződés elkerülése érdekében az orrsprayt csak egy személy használhatja.

Szobahőmérsékleten használható (általában 17°C - 25°C között).

1. Szükség esetén fújja ki az orrát.
2. Az Otrivin Natural Aloe Vera orrspray használata előtt és után mosson kezet alaposan!
3. Vegye le a spray kupakját!
4. Ha az orrsprayt hosszú ideig nem használták, használat előtt permetezzen egyet a levegőbe. Ha a szórófej eltömődött, tisztítsa meg forró folyó víz alatt és törölje szárazra egy tiszta törülőkendővel.
5. *Gyermekek esetén, akik nem tudják önállóan használni a készítményt:* Fektesse a gyermeket a hátára, egyik irányba döntött fejjel, így az oldat könnyebben szétterül (ábra 1.).
Gyermekek és felnőttek esetén, akik önállóan használják a készítményt: Tartsa a fejét a mosdó fölé, billentse az egyik oldalra, hogy a lehető legvízszintesebben legyen (ábra 2.).

6. Helyezze a szórófejet a ellentétes oldali orrnyílásba és határozottan nyomja meg (2-3 másodpercig).
7. Billentse a fejét a másik irányba és ismételje meg a befúvást a másik orrnyílásba is.
8. Hagyja a készítményt néhány másodpercig hatni! Ezidő alatt ne fújja ki az orrát, de szükség esetén törölje meg.
9. Majd, szükség esetén fújja ki az orrát.
10. Minden használat után tisztítsa meg a szórófejet forró folyóvíz alatt majd törölje alaposan szárazra egy tiszta törülőkendővel és ezután tegye vissza a védőkupakot!
11. Tisztítsa meg az adagolót forró vízzel, ne használjon vegyi anyagokat, mosogatószer vagy fertőtlenítőszer. Ne tegye mikrohullámú sütőbe!



ábra 1.



ábra 2.

5. Az Ön biztonsága érdekében Figyelem



Nyomás alatt lévő tartalom: napfénytől távol tartandó és ne tegye ki 50 °C feletti hőmérsékletnek!

Nyomás alatt álló tartály: Hő hatására robbanhat.

Hőtől / szikrától / nyílt lángtól / forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás! A tartályt még a használatot követően se lyukassza ki, vagy dobja tűzbe.


A gyermekek számára készített szórófejet úgy tervezték, hogy illeszkedjen az orrlyukak természetes formájához. A biztonsági gyűrűvel elkerülhető, hogy a szórófej túl mélyen kerüljön az orrba és a gyermek megsérüljön.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

6. Hogyan tárolja az Otrivin Natural Aloe Vera orrsprayt?

A készítmény gyermekektől elzárva tartandó!

A készítményt a csomagoláson feltüntetett lejáratási idő után ne használja. Tárolja a spray-t az eredeti csomagoló dobozban.

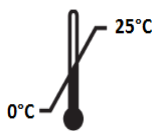

Tárolja 0 °C és 25 °C között. Ne fagyassza le.

7. További információk

ÖSSZETEVŐK: Aloe Vera por, tengervíz és tisztított víz. Tartósítószer mentes.

A nitrogént inert hajtógázként tartalmazza a nyomás alatt lévő tartály. A hajtógáz nem érintkezik az oldattal.

Az Otrivin Natural Aloe Vera orrspray 100 ml-es kiszerelésben kapható.



Haleon CH SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Switzerland



Haleon Medical Devices,
Clocherane, Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
X35 Y983
Ireland



Forgalmazza: Haleon Hungary Kft. 1538 Budapest, Pf. 586., Tel.: +36 1 225-5800



0459 Orvostechnikai eszköz



Dátum: 2023. június

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a Haleon vállalatcsoport. ©2023 Haleon vállalatcsoport vagy licenszadója